


INSTRUCCIONES DE USO

Puede realizar la prueba 7 días después de la relación en la que cree haber quedado embarazada


- 1** Abra el empaque y retire la prueba

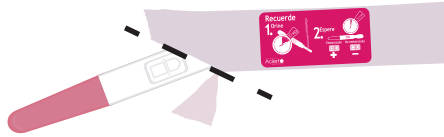

- 2** Quítele la tapa de color



- 3** Orine sobre la punta absorbente durante 10 segundos

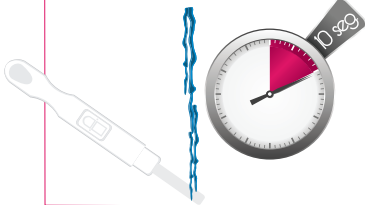

- 4** Coloque la prueba sobre una superficie plana y espere 3 minutos



- 5** Lea su resultado



No embarazada



Embarazada

Posibles lecturas:



Embarazada
• Línea de resultado más intensa



Embarazada
• Ambas líneas de igual intensidad



Embarazada
• Línea de control más intensa

Si usted no está segura de su resultado, consulte la pregunta 7 al dorso.
IMPORTANTE: El resultado debe ser leído a más tardar 15 minutos después de haber realizado la prueba.

Más del
99%

de efectividad
según pruebas
de laboratorio
y de uso.

PREGUNTAS FRECUENTES

Acierto 
PARA ESTAR SEGURA

1. ¿Qué tan confiable es Acierto?

Acierto tiene más de un 99% de precisión según pruebas de uso y de laboratorio.

2. ¿Cómo funciona Acierto?

Cuando usted está embarazada, su cuerpo segrega una hormona llamada hCG (Gonadotropina Coriónica Humana). La concentración de hCG aumenta rápidamente al inicio del embarazo. Acierto detecta pequeñas cantidades de esta hormona desde 7 días después de la relación en que se dio el embarazo.

3. ¿Cuándo me puedo hacer un Acierto?

Puede utilizar Acierto en cualquier momento a partir de los siete días después de la relación en que cree haber quedado embarazada. Si su resultado indica que no está embarazada y aún tiene duda, es posible que haya realizado la prueba muy temprano. Realice otra prueba dentro de 3 días. Consulte la pregunta 9.

4. ¿Debo utilizar la primera orina de la mañana?

No. Acierto es capaz de detectar la presencia de la hormona hCG en cualquier momento del día. Esto significa que puede hacer la prueba cuando tenga ganas de orinar.

5. ¿Mi resultado puede ser afectado por algún medicamento?

- Analgésicos y antiinflamatorios de uso común no afectan el resultado.
- Los antibióticos no afectan el resultado.
- Las píldoras anticonceptivas no afectan el resultado.
- Los tratamientos para infecciones vaginales no afectan el resultado.
- Medicamentos que contengan hCG, como por ejemplo tratamientos de fertilidad, pueden dar falsos resultados.
- Ciertas condiciones médicas poco comunes pueden dar falsos resultados. Consulte a su médico.

6. ¿Qué debo hacer cuando no aparece ninguna línea rosado – púrpura?

Si no aparece ninguna línea rosado – púrpura al cabo de 15 minutos, la prueba no funcionó. Esto puede ser porque no colocó suficiente orina o colocó demasiada orina en la punta absorbente de la prueba. Nosotros le recomendamos que haga una nueva prueba teniendo cuidado de seguir claramente las indicaciones.

7. ¿Y si no estoy segura de mi resultado?

- Si aparece una línea rosado – púrpura en cada una de las ventanas de la prueba, su resultado es “embarazada”. La intensidad de las líneas puede variar según sea el caso (vea los casos a, b y c al frente de este instructivo). Estos 3 casos muestran un resultado positivo.
- Si sólo aparece una línea rosado – púrpura en la ventana redondeada, su resultado es “No embarazada”.
- Si no está segura de su resultado, se le recomienda esperar 3 días y hacer otra prueba Acierto.

8. ¿Qué debo hacer si el resultado de mi prueba es positivo?

Si su prueba indica que está embarazada, consulte de inmediato a su médico.

9. ¿Si mi prueba indica un resultado negativo, pero tengo un atraso en la regla, qué debo hacer?

Si tiene un atraso y el resultado de su prueba es “No embarazada”, realice otra prueba Acierto dentro de 3 días. Si obtiene nuevamente un resultado negativo y el atraso persiste, consulte a su médico.

Mantenga a temperatura ambiente. Producto únicamente de uso externo.

IMPORTANTE: El resultado debe ser leído a más tardar 15 minutos después de haber realizado la prueba.



Instrucciones digitales



@aciertoca

www.prumisa.com



800-PRUMISA (Válido para Costa Rica)